



## **DETECTOR DE PREÑEZ PREG-TONE II**

### **RAPIDO, SEGURO Y PRECISO:**

- \*La prueba puede ser completada en menos de 30 segundos
- \*Todas las pruebas se realizan externamente sin causar daño a la cerda.
- \*Precisión probada por miles de productores.

### **DURABLE**

- \*Hecho de plástico de alto impacto
- \*Resistente a los ácidos

### **ECONOMICO**

- \*batería reemplazable de 9volts
- \*La batería puede durar por meses

### **FACIL DE USAR**

- \*Fácil de usar con una mano
- \*Use cualquier tipo de aceite para el contacto.

### **INDICADORES**

- \*Sonido fuerte
- \*Sonido intermitente indica buen contacto con la piel
- \*Sonido continuo indica preñez.

### **CALIDAD**

- \*La marca RENCO tiene mas de 30 años de experiencia en pruebas y fabricación de equipos de ultrasonido



### **INSTRUCCIONES DE USO:**

- Paso 1: aplique liquido de contacto, como aceite mineral o de cocina, al animal en el área que se muestra
- Paso 2: Encienda el equipo presionando la caja patentada con el pulgar.
- Paso 3: Presione el instrumento sobre la piel y escanee el interior del animal



*Servicios Pecuarios de Occidente SA de CV*  
*Av. Atotonilco No. 4584-A Col. Benito Juárez*  
*tel: +52 (33) 3636 8222, 3636 2896*  
*cel: +52 (33) 1613 7666*  
*www.serviciospecuarios.com*

