



SOW CALIPER

El calibrador de la condición corporal de las cerdas ayuda a responder una pregunta importante que enfrentan los criadores de cerdos en la actualidad:

¿ESTOY SOBREALIMENTANDO A LAS CERDAS EN GESTACIÓN?

*"Los porcicultores que estaban sobrealimentando a las hembras en gestación han podido **reducir el costo del alimento y mejorar el rendimiento reproductivo**. Evitar las cerdas delgadas también mejora el bienestar de los animales".*

"El bienestar animal y el costo son las razones por las que es tan importante alimentar bien a las cerdas".

"El Sow Caliper no es realmente un calibrador, y no es realmente un transportador, creo que es un híbrido de los dos. Sin embargo, lo llamamos calibrador porque pensamos que podría ser más fácil de entender para las personas".

Mark Knauer, profesor asociado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, especialista en cerdos de extensión y desarrollador del Sow Caliper.



1.



Usa tu mano para palpar la última costilla de la cerda. Después de medir varias cerdas estimar la ubicación de la última costilla será simple.

2.

Usa una mano para colocar el calibrador en la última costilla de la columna vertebral de la cerda. No presiones las puntas del calibrador en la cerda.



3.

Asegúrate de que el calibrador esté correctamente alineado y lee la medida: Thin, Ideal o Fat.

Servicios Pecuarios de Occidente SA de CV
Av. Atotonilco No. 4584-A Col. Benito Juárez
tel: +52 (33) 3636 8222, 3636 2896
cel: +52 (33) 1613 7666
www.serviciospecuarios.com

