



DESCOLADOR DE GAS, MODO DE USO.

1.-Para cargar de gas el corta-colas, poner la botella de gas sobre la válvula de llenado hasta que el gas rebase por la misma

2.-Para encender el corta-colas, empujar la palanca negra hacia arriba en dirección al cuchillo y poner el botón de ajuste de la parte inferior en posición +.

Pasados unos 2 minutos, el cuchillo ha alcanzado la temperatura deseada (unos 520°C), estando preparado para usarse.

Entre camadas poner el botón de ajuste en posición + para ahorrar gas. Para continuar, poner el botón en posición + y ya tenemos otra vez el corta-colas preparado para usarlo.

3.-Se recomienda cortar la cola lentamente, es decir, dejando deslizar el cuchillo al través de la cola (1/2 segundo). Así la herida tiene tiempo de cicatrizar por efecto de la temperatura, Si cortamos demasiado rápido, pueden presentarse hemorragias y por ello también alguna infección. Una vez terminado el trabajo empujar la palanca negra hacia abajo y se apagará el corta-colas.

Precauciones

No llenar nunca de gas el aparato cerca del fuego ni con el corta. Colas en funcionamiento.

No exponerlo nunca a temperaturas superiores a 50°C tampoco excesivamente al sol.

Conservación

El catalizador que puede verse por la tela metálica del cuchillo es muy importante para obtener una buena combustión y no debe nunca someterse a movimientos mecánicos ni a la humedad.

Si es necesario limpiar el corta-colas, se debe usar un trapo seco y si fuere necesario un papel de lija.

El corta-colas y la botella de recambio de gas se venden por separado.



Servicios Pecuarios de Occidente SA de CV
Av. Atotonilco No. 4584-A Col. Benito Juárez
tel: +52 (33) 3636 8222, 3636 2896
cel: +52 (33) 1613 7666
www.serviciospecuarios.com

